


### Omschrijving:

1. Aan / Uit schakelaar
2. status LED
3. Input t.b.v. bed / stoelmat
4. Batterij vak
5. Tijdschakelaars

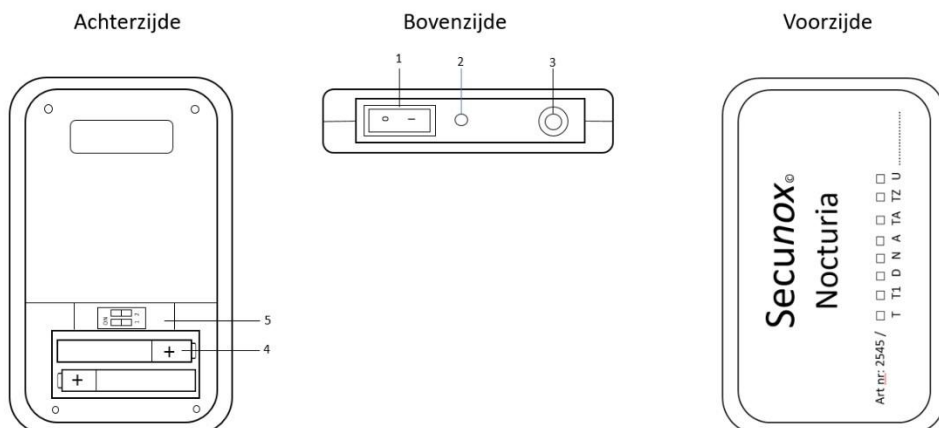

### Installatie van de batterijen:

1. Het batterijcompartiment bevindt zich aan de achterzijde van de Nocturia.
2. Verwijder het klepje door deze naar onder te schuiven en til deze op
3. Plaats 2 x batterij type AAA volgens de correcte polariteit.
4. Als de batterijen geplaatst zijn gaat de groene LED aan de bovenzijde even branden.
5. Dit geeft aan dat de batterijen correct geplaatst zijn. Plaats het klepje op de achterzijde terug.

### Bed- Stoelmat


U heeft standaard de mogelijkheid om te kiezen voor een bed of stoelmat. De bed- of stoelmat kunt u inprikken op de input aan de bovenzijde (3). **Nocturia inschakelen:**

Zet de cliënt in de stoel of leg deze in bed. Zet nu de aan / uit schakelaar op "I". De groene status LED aan de bovenzijde gaat ter bevestiging branden dat de Nocturia is ingeschakeld. De Nocturia maakt nu een alarmoproep als de cliënt langer dan de vooraf ingestelde tijd het bed of de stoel heeft verlaten. **Nocturia uitschakelen:**

Zet de aan / uit schakelaar op "0". De groene status LED aan de bovenzijde gaat nu uit.

### Tijden instellen op de Nocturia:

Verwijder het klepje door deze naar onderen te schuiven en til deze op. U kunt middels de tijdschakelaars de tijden zoals afgebeeld in afbeelding 1 instellen.

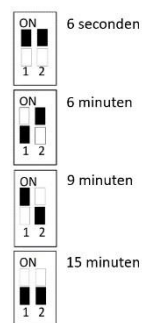

Afbeelding 1

### Onderhoud:

Uitsluitend reinigen met een droge doek.

Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.

### Garantie:

Voor wijzigingen en veranderingen aan het product of schade veroorzaakt door een verkeerd gebruik van dit product, kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd. Tevens vervalt daardoor de garantie. **Algemeen:**

Ontwerpen en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Alle logo's, merken en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren en worden hierbij als zodanig erkend. Deze handleiding is met zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Secunox kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten in deze handleiding of de gevolgen daarvan. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor latere raadpleging.



### Opgelet:

Dit product is voorzien van dit symbool. Dit symbool geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische producten niet met het gewone huisafval verwijderd mogen worden. Voor dit soort producten zijn er speciale inzamelingspunten. Dit product is vervaardigd en geleverd in overeenstemming met de relevante reglementen en richtlijnen die voor alle lidstaten van de Europese Unie gelden. Het voldoet ook aan alle toepasselijke specificaties en reglementen van het land van verkoop.

Op aanvraag is officiële documentatie verkrijgbaar. Inclusief, maar niet uitsluitend: Conformiteitsverklaring (en productidentiteit), materiaalveiligheidsinformatie en producttestrapport.

Wend u tot onze klantenservice voor ondersteuning:

via de website: <http://www.secunox.nl> via

e-mail: [info@secunox.nl](mailto:info@secunox.nl)

telefonisch: +31 (0)85 008 00 30 (tijdens kantooruren)

**Secunox., Mient 4, 2903 LC Capelle aan den IJssel, Nederland**